


Introduktion:


Tak fordi du har valgt SEPAs automatiske dispenser til blå overtrækssko. Denne model kan indeholde op til 110 stk. overtrækssko. Læs venligst følgende instruktioner før dispenseren tages i brug.

Opfyldning:


- 1) Stil dispenseren på højkant som vist på billede I-1
- 2) Åben låget som vist på billede nr. 2
- 3) Tag et bundt overtrækssko, med begge hænder, som vist på billede nr. 3. Før derefter de to rækker af plastikvedhæng ned i hver sin sliske. (Hvis bredden ikke passer, juster da bredden mellem den venstre side og den højre side af de to rækker plastikvedhæng.)
- 4) Skub overtræksskoene forsigtigt fremad og sørg for, at holde bundtet så lige som muligt når det bliver ført ned i de to slisker, da det derved sikres, at alle overtrækssko bliver ført ned i slisken. Se billede nr. 4.

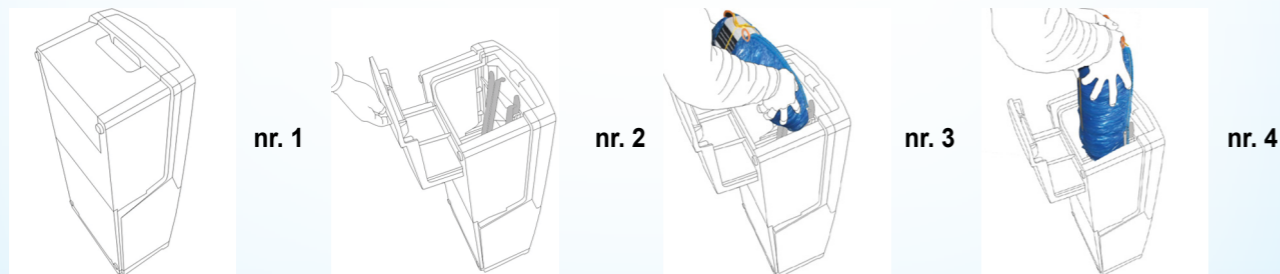

- 5) Skub med begge hænder på begge sider af bundtet og pres ned, indtil alle overtrækssko er ført ned i slisken og den sidste er igennem låsen, som vist på billede nr. 5.
- 6) Bind sløjfen op, som holder overtræksskoene sammen, og fjern den som vist på billede nr. 6.
- 7) Fjern pappet, som vist på billede nr. 7.
- 8) Fjern de to plastikstrips fra begge sider af overtræksskoene, ved at presse ned på overtræksskoene imens stripsene trækkes op, som vist på billede nr. 8.

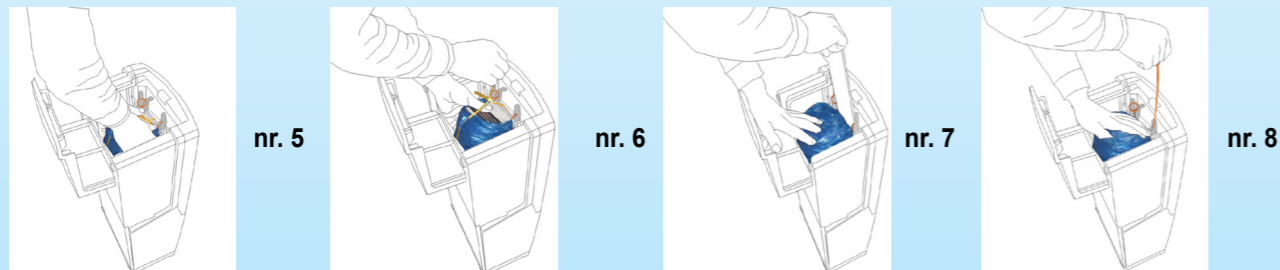

- 9) Luk låget og stil dispenseren ned i vandret position og træk den første overtrækssko ud under metalpladen, som vist på billede nr. 9.
- 10) Før den første overtrækssko langs slisken til den er på plads, som vist på billede nr. 10.
- 11) Dispenseren er nu klar til brug, som vist på billede nr. 11.

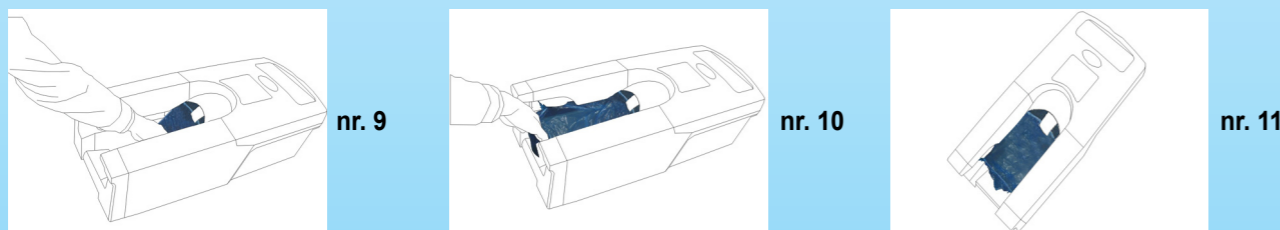

Oftest forekomne problemer:

Problem I:


Et eller begge plastikvedhæng er ikke i slisken, som vist på billede nr. 12.

Årsag:

Under opfyldning af dispenseren er et eller flere plastikvedhæng ikke blevet ført ordentlig ned i slisken.

Løsning:

Vær opmærksom på, at alle plastikvedhæng er ført ned i slisken, som vist på billede nr. 13. Hvis dette ikke er tilfældet kan der presses ned på de to låse, der er på hver sliske, for at løsne disse så overtræksskoene kan tages ud. Herefter kan de overtrækssko, hvis plastikvedhæng ikke er i slisken, føres heri.

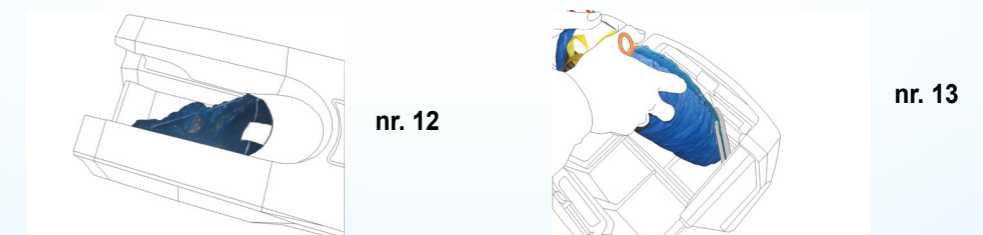

Problem II:


Skoen er kun blevet omtrukket af halvdelen af overtræksskoen, som vist på billede nr. 14.

Årsag:

Da brugeren af dispenseren trak sin sko igennem overtræksskoen, er forenden af skoen blevet løftet for højt, således det kun er den bagerste del af skoen der er i overtræksskoen, som vist på billede nr. 15.


Løsning:

Sørg for at hele skoen trædes ned i overtræksskoen og at bevægelsen ind mod brugeren er vandret, som vist på billede nr. 16.

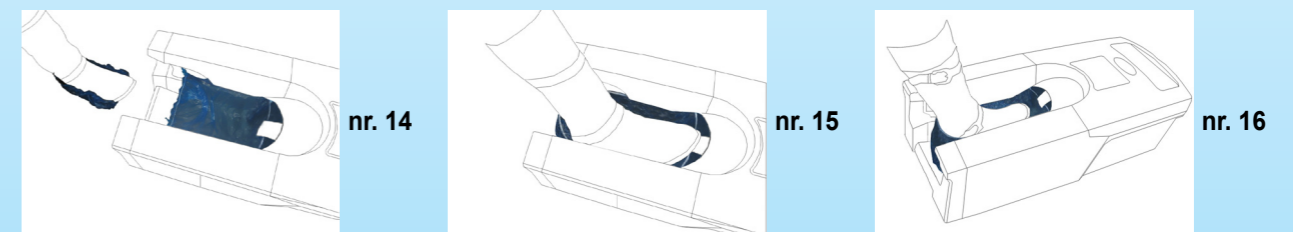


Hvordan dispenserens til overtrækssko skal bruges:


- 1) Før foden, med hælen først, ind i skoovertrækket, som vist på billede nr. 17.
- 2) Træk foden vandret tilbage, som vist på billede nr. 18.
- 3) Fortsæt bevægelsen indtil plastikvedhængene har forladt slisken og den næste overtrækssko er klar, som vist på billede nr. 19.

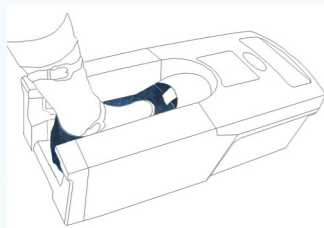

nr. 17

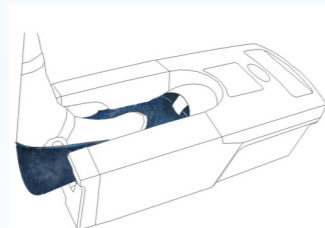

nr. 18

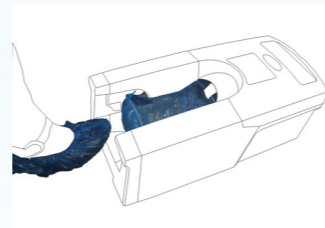


nr. 19

Vigtig information:


- 1) Under opfyldning af overtrækssko, vær da opmærksom på, at alle plastikvedhæng er inde i slisken, som vist på billede nr. 20.
- 2) Under brug af dispenserens, skal skoen føres helt ned i overtræksskoen med hælen først, som vist på billede nr. 21 og derefter føres tilbage mod kroppen i en vandret bevægelse. Løft ikke den forreste del af foden for højt, så hele foden ikke er nede i overtræksskoen, som vist på billede nr. 22.



nr. 20

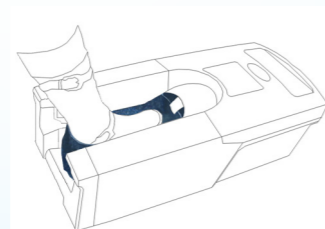

nr. 21

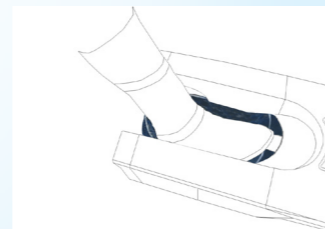

nr. 22

Mål og specifikationer:

Dispenser: 70 x 32 x 23 cm
Pakkens mål: 75 x 39 x 28 cm
Pakkens nettovægt: 10 kg
Pakkens bruttovægt: 12 kg

Pakkens indhold:

Dispenser til overtrækssko: 1 stk.
Brugermanual: 1 stk.

Såfremt der er spørgsmål omhandlende SEPA 100, kan der altid rettes henvendelse til:

SEPA

Mail: info@sepa.dk
Tlf.: 4241 7454 / 4241 7455

For instruktionsvideoer se www.sepa.dk.
cvr. nr.: 33652615



BRUGERVEJLEDNING - SEPA 100

Dispenser til påføring af overtrækssko

For instruktionsvideoer se www.sepa.dk